

チューブコネクター方向の調節方法

チューブコネクターの位置を360度回転して好きな角度に調節可能



①注射器の反対側のハンドルロックをコインで緩める



②バレルカバーを回転させて、好きな位置にセット。①の容量でハンドルロックを再度締める



チューブコネクターの取り外し方法・取付方法

チューブコネクターを下向きにすると、バルブ内部のパーツ飛び出しが防げます



このような順番でセット



ニードルロックの取り外し方法・取付方法

ニードルロックを上向きにすると、バルブ内部のパーツ飛び出しが防げます



このような順番でセット



容量設定の方法

容量の設定は、ピストン先端位置を希望する容量の目盛りに合わせて行います

下図では4mlに設定されています



①ラウンドナットを緩めます



ラウンドナット(固定ポジション)



ドースセット

②ドースセットを回し、ピストン位置を希望する目盛りに合わせます



下図では3mlに設定されています。



③ラウンドナット回して固定ポジションに設定し、容量が変更しないようにする。

バイアル固定アダプター(オプション)の取付方法

■バイアル固定アダプターの部品について



①吸引針を注射器本体に取り付けます。
吸引針の方向に注意ください



②バイアルホルダー用カバーを取り付けます



③もう一方のバイアル用カバーを取り付けます。



④バイアルホルダーリングを取り付けます。



⑤ワクチンボトルを卓上に置き、上から被せるように押込みます。

バイアルホルダーの奥までしっかりスライドしてください



バイアルホルダーと
ボトルネック部分が
左写真のようにしっ
かりと固定してい
ることを確認してく
ださい。

ボトルがぐらぐら
している場合、付
属のバイアルワッ
シャーを使用してく
ださい。

10基注射針を接続する方法

本体に付属している10先用アダプターをニードルロック先端に差し込みます。



PP製リザーバー(オプション品)のバルブ接続方法

PP製リザーバー60ml

リザーバー接続バルブ

チューブコネクター(右)と形状が異なります

リザーバー接続バルブにワッシャーをセット



チューブコネクターを外した後、リザーバー接続バルブを注射器にセット。

ボトルを付けて完成



ご使用に関してご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。

株式会社 **伸 和**

〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目2番8号

TEL : (06) 6353-5156 (代)

FAX : (06) 6353-5128

www.shinwahc.co.jp

E-mail : info@shinwahc.co.jp

動物用医療機器製造業登録番号

30製造業第590号

第三種動物用医療機器製造販売業許可番号

30製販業Ⅲ第142号