

ハウプトナー 連続注射器 - 10ml / 25ml / 30ml / 50ml -

ハウプトナー連続注射器は、堅牢で簡単に使用できるドイツ製連続注射器（動物用一般医療機器）です。

ニードルロック

ニッケルメッキ真鍮製のルアーロック式です。5基注射針を接続できます。ルアーロック部はねじ式で簡単に取り外し可能です。※10基注射針は付属アダプターが必要。

ピストンロッド

ニッケルクロムメッキ真鍮製で丈夫な構造です。必要に応じて簡単に交換が可能です。

ドースセット

つまみを使って簡単に希望する容量に設定することが可能です。



バレルカバー

金属製で丈夫な構造です。必要に応じて簡単に交換が可能です。

グリップ

アルミニウムダイキャストのグリップとニッケルクロムメッキ真鍮製のパーツ等で構成されています。金属製の丈夫で握りやすい形状を採用しています。

ラチェットセット

■ 簡単操作

薬液を一度バレル内に充填すると、バレル内の薬液が空になるまで、設定した容量で連続的に注射できます。

■ 4種類の注射器

10ml / 25ml / 30ml / 50mlの4機種で構成されています。投与したい容量や用途に応じてお選びいただけます。

■ 丈夫な注射器

注射器の大部分は金属製で非常に堅牢な構造です。※注射器内部パーツのガラスバレル・ピストン・ワッシャー等は除く

■ メンテナンス

バレルやピストン等の交換は工具なし簡単に交換可能です。

■ 消毒・滅菌について

オートクレーブ滅菌・煮沸消毒が可能です。※本体を分解し、ゴム製ピストンとワッシャーは必ず取り外してください

■ 5基・10基注射針接続について

注射器のニードル接続部分は5先のルアーロック構造になっています。ニードルはねじ式になっているので簡単に取り外しが可能です。10基注射針をご使用いただく場合、本体に付属しているPTFE製の10先アダプターを装着してからご使用ください。






※ 連続注射器に針は付属していません



品番	HP16300000	HP16355000	HP16360000	HP16390000
容量	10 ml	25 ml	30 ml	50 ml
容量設定 (ml)	0.25 - 0.5 - 0.75 - 1	0.5 - 1 - 1.5 - 2 - 2.5	1 - 2 - 3 - 4 - 5	1 - 2 - 3 - 4 - 5
針先 (注)	5先 (ルアーロック)	5先 (ルアーロック)	5先 (ルアーロック)	5先 (ルアーロック)
重さ	412 g	484 g	420 g	456 g

(注) 本体には、PTFE製の10先アダプターが付属しています。10基注射針をご使用の場合、先にニードルロックに取り付けてください。

スペアパーツ

	10 ml	25 ml	30 ml	50 ml
 ラチェットセット	HP16300760			
 ピストンロッドセット	HP16300700	HP16355700	HP16360700	HP16390700
 ガラスバレル	HP14610010	HP16355690	HP14650010	HP16390090
 パーツセット (ピストン・ワッシャー等)	HP14610500	HP16355500	HP14650500	
 スプリング	HP16360330			

ハウプトナー製造会社情報



アクセサリ



ハウプトナー連続注射器用フレキシブル延長キット
注射針接続部を延長したい場合に、35cmのプラスチック製の延長キットもご用意しております。



連続分注器 理化学機器 輸入販売

株式会社 伸 和



ご用命は下記の取扱店へ

大阪市北区天神橋2丁目2番8号

TEL: (06)6353-5156

FAX: (06)6353-5128

www.shinwahc.co.jp info@shinwahc.co.jp

動物用医療機器製造業登録番号 30製造第590号
第三種動物用医療機器製造販売業許可 30製販第142号