

養豚用

動物用一般医療機器

SOCOREX
SWISS

ソコレックスSHウルトラ連続注射器 (ボトルマウントタイプ)

Socorex® Self-refilling Micro-range syringe with Bottle Mount

ワクチンボトルをバイアルホルダーに接続します。

希望する容量を設定します。

ピストン動作を繰り返すと連続注射が可能です。


※ 針先は5先です。

10基注射針をご利用の場合、付属のアダプターを付けて使用ください。




品番	容量	可変容量 (ml)	目盛刻み (ml)
1810.1.05005	0.5 ml	0.1 ~ 0.5	0.05
1810.1.0501	1 ml	0.1 ~ 1	0.05
1810.1.0502	2 ml	0.3 ~ 2	0.1

ワクチンボトルの取付け

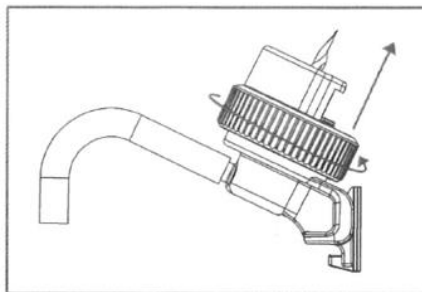

バイアルホルダーからボトルロックを取り外す

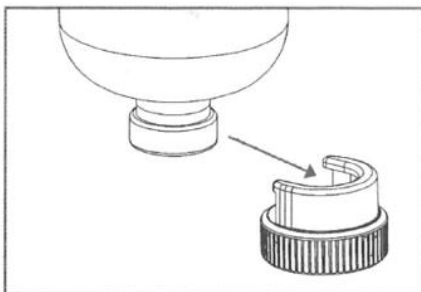

ワクチンボトルにボトルロックを取り付ける



①ワクチンボトルのセプタムに針を突き刺す
②ボトルロックをきつく締めて固定する

主な消耗品



ガラスバレル

肉厚で丈夫な目盛り付ガラスです。
耐熱性・耐薬品性に優れています。

品番	容量	入数
01810.005	0.5 ml	6本入
01810.01	1 ml	6本入
01810.02	2 ml	6本入

アクセサリー



ウルトラ用バイアルホルダー

ワクチンボトルを注射器に取り付けることのできるアタッチメントです。ねじ式でワクチンボトルを固定する方式を採用しているため、様々なワクチンボトル取付に対応できます。

品番	1.1810.010
入数	1個入

スペアパーツセット

よく使う消耗品パーツがセットになっています。
予備用に常備しておくとお安心です。

【セット内容】 吸引・吐出カートリッジ x 各1個
ワッシャー x 2個

品番	容量	入数
1.1810.005	0.5 ml	1 set
1.1810.01	1 ml	1 set
1.1810.02	2 ml	1 set

ソコレックス用潤滑剤

鉱物油系潤滑油 (非油性・非毒性)
ピストンやガラスバレル内壁に塗布することで保護膜を形成し、過度な摩耗を防ぎ、錆や汚れから保護します。高温環境でも形成した保護膜に影響がありません。(オートクレーブ可能)

品番	1.170.705
容量	70 ml





 養豚用

ソコレックスSHウルトラ連続注射器 (ボトルマウントタイプ)

軽量の注射器

クラシック連続注射器と比べても約半分の重量です。
軽量なので女性スタッフにもお勧めです。

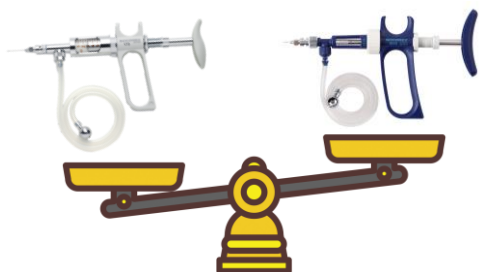

容量	クラシック 連続注射器	ウルトラ 連続注射器	比較
0.5 ml	166 g	90 g	46% 軽量
1 ml	176 g	100 g	44% 軽量
2 ml	188 g	105 g	44% 軽量

バルブ部品の交換が容易

バルブ部品が黄色のプラスチック内部に組み込まれているので、パーツの紛失を大幅に軽減し、素早い交換も実現します。

部品数も少なく、部品管理が容易になります。



- バルブパーツが一体化したカートリッジ構造で、交換が容易です。
- カートリッジの形状が異なるため、間違っても装着することはありません。

簡単なメンテナンス

注射器は少ないパーツで構成されているので、簡単に分解や組み立てが可能です。



- 本体は主に9つのパーツからできています。
- 特別な工具なしで簡単に分解できます。

ピストンにはOリングが付いていません。

Oリング交換といった面倒な作業から解放されます。



衛生対策も大丈夫

- 耐熱性に優れた材質を選定しています。本体を組み立てたままオートクレーブ滅菌(121℃)に耐えることができます。
- 全ての部品は煮沸消毒しても問題ありません。
- 耐薬品性に配慮した材料を使用しています。アルコールなどの除菌も大体問題なく使用できます。



株式会社

伸

和



大阪市北区天神橋2丁目2番8号
TEL: (06)6353-5156
FAX: (06)6353-5128
<https://www.shinwahc.co.jp>

ご用命は下記の取扱店へ