

養鶏用

動物用一般医療機器

SOCOREX  
SWISS

# ソコレックスSHウルトラ連続注射器

## Socorex® ultra 1810 Micro-range tube feeding syringe

薬液ボトルと注射器をシリコンチューブで接続します。

希望する容量を設定します。

ピストン動作を繰り返すと連続注射が可能です。



品番	容量	可変容量 (ml)	目盛刻み (ml)	針先
1810.2.0501	1 ml	0.1 ~ 1	0.05	5先
1810.2.0502	2 ml	0.3 ~ 2	0.1	5先

### モデル選定ガイド

容量ごとの再現性とストローク長を参考に最適なモデルを選定ください。

注射器 容量	最小容量			中間容量			最大容量		
	容量(ml)	ストローク (mm)	再現性 CV%	容量(ml)	ストローク (mm)	再現性 CV%	容量(ml)	ストローク (mm)	再現性 CV%
1 ml	0.1	2.0	<0.7%	0.5	9.5	<0.6%	1.0	19	<0.4%
2 ml	0.3	3.0	<0.6%	1.0	10.5	<0.5%	2.0	21	<0.4%

### 主な消耗品

### アクセサリ



#### ガラスバレル

肉厚で丈夫な目盛り付ガラスです。  
耐熱性・耐薬品性に優れています。

品番	容量	入数
01810.01	1 ml	6本入
01810.02	2 ml	6本入



#### 輸液バッグ用ニードル

【動物用一般医療機器】  
点滴バッグなどの大容量輸液バッグから直接薬液を取り込むためのニードルです。

品番	1.187.590
入数	6個入



#### スペアパーツセット

よく使う消耗品パーツがセットになっています。  
予備用に常備しておくとお安心です。

【セット内容】 吸引・吐出カートリッジ x 各1個  
ワッシャー x 2個

品番	容量	入数
1.1810.01	1 ml	1 set
1.1810.02	2 ml	1 set



#### ソコレックス用潤滑剤

鉱物油系潤滑油（非油性・非毒性）  
ピストンやガラスバレル内壁に塗布することで保護膜を形成し、過度な摩擦を防ぎ、錆や汚れから保護します。高温環境でも形成した保護膜に影響がありません。（オートクレーブ可能）

品番	1.170.705
容量	70 ml


養鶏用

動物用一般医療機器

# ソコレックスSHウルトラ連続注射器

## 軽量の注射器

クラシック連続注射器と比べても約半分の重量です。  
軽量なので女性スタッフにもお勧めです。

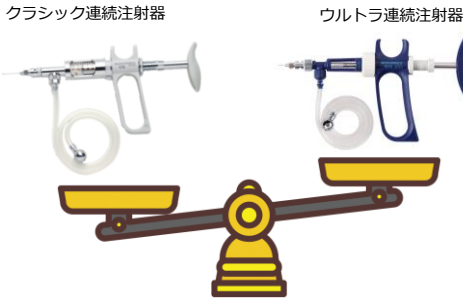


容量	クラシック	ウルトラ	比較
1 ml	154 g	90 g	42% 軽量
2 ml	166 g	94 g	44% 軽量

## バルブ部品の交換が容易

バルブ部品が黄色のプラスチック内部に組み込まれているので、パーツの紛失を大幅に軽減し、素早い交換も実現します。

部品数も少なく、部品管理が容易になります。

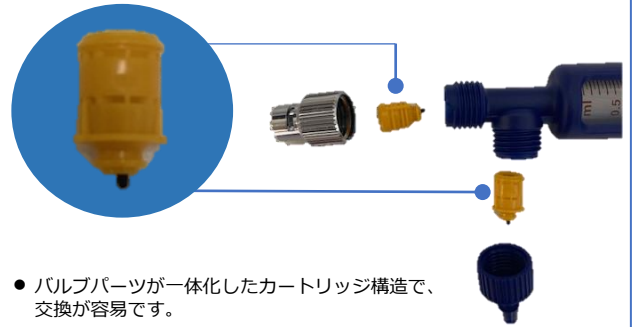

- バルブパーツが一体化したカートリッジ構造で、交換が容易です。
- カートリッジの形状が異なるため、間違えて装着することはありません。

## 簡単なメンテナンス

注射器は少ないパーツで構成されているので、簡単に分解や組み立てが可能です。





- 本体は主に9つのパーツからできています。
- 特別な工具なしで簡単に分解できます。

ピistonにはOリングが付いていません。  
Oリング交換といった面倒な作業から解放されます。



## 衛生対策も大丈夫

- 耐熱性に優れた材質を選定しています。本体を組み立てたままオートクレーブ滅菌(121℃)に耐えることができます。
- 全ての部品は煮沸消毒しても問題ありません。
- 耐薬品性に配慮した材料を使用しています。アルコールなどの除菌も大体問題なく使用できます。

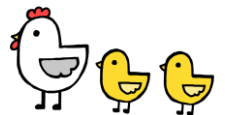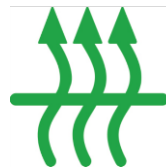

株式会社 伸 和



大阪市北区天神橋2丁目2番8号  
TEL: (06)6353-5156  
FAX: (06)6353-5128  
<https://www.shinwahc.co.jp>

ご用命は下記の取扱店へ